

Conditions d'installation

Avant que nous puissions installer votre système, veuillez vous assurer que les exigences suivantes sont remplies afin de garantir une installation sans faille de votre nouveau système BD Rowa. Vous trouverez également une explication détaillée de chaque aspect dans votre contrat sous la rubrique "Exigences d'installation et conditions de fonctionnement".

La pièce dans son ensemble doit être au moins 80 mm plus haute et 50 mm plus large que le système.



Les pieds de nivellement de la machine peuvent compenser les irrégularités du sol jusqu'à 30 mm. Toute irrégularité plus importante doit être nivelée.



Le BD Rowa™ Vmax doit être facile d'accès et sans accident pour l'équipe d'entretien. L'espace d'installation requis doit être disponible et doit être complètement dégagé.



La charge surfacique peut atteindre 600 kg/m² en fonction du système installé. Veuillez vous référer à votre contrat pour connaître le poids spécifique.



La température ambiante du système doit être comprise entre 10 °C et 22 °C. La température à l'intérieur de la machine peut être jusqu'à 3 °C plus élevée que la température ambiante.



Les conditions de raccordement électrique sont spécifiques au produit et sont indiquées lors de la phase de planification. Le client est responsable de la mise en place d'un câblage électrique suffisant.



Une connexion internet forfaitaire (min. port 80) est nécessaire. Une prise RJ45 doit se trouver à proximité immédiate de l'avant du système. La ligne de données doit être de type CAT 5 ou supérieur.



Pendant l'installation, une personne doit être disponible pour les employés de BD Rowa, en cas de questions ou de problèmes spécifiques.



Toutes les mesures de protection contre l'incendie requises doivent être examinées ou initiées par le client.



Le lieu d'installation de la machine doit être exempt de poussière au moment de l'installation. Aucun travail simultané sur le béton, les cloisons sèches ou la chape ne doit être effectué.

Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter votre personne de contact BD Rowa.

Ce document ne remplace pas le mode d'emploi. Le contenu du mode d'emploi doit également être lu attentivement et respecté !