

BD Rowa™ EasyLoad/ProLog

OCR - Gestión de fechas de caducidad

1 Iniciar la gestión de la fecha de caducidad del OCR



Abre el programa de gestión de fechas de caducidad OCR en tu ordenador.



Abre **Análisis de imágenes** para procesar las fechas de caducidad.




La **Lista de Artículos** te muestra la cantidad total de envases que hay que comprobar.



¿Quieres saber más?

Visita el BD Rowa™ Customer Learning Center en <https://clc.rowa.de>.

2 Indica la fecha de caducidad

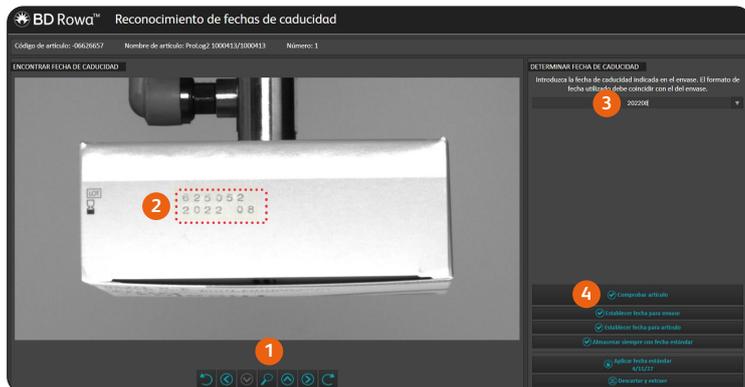

- 1 Utiliza los botones de control para encontrar la imagen que contiene la fecha de caducidad.
- 2 Dibuja un marco alrededor de la fecha de caducidad.
- 3 Introduce la fecha de caducidad exactamente como está escrita en el envase, incluyendo caracteres como -, ,, y /.
- 4 Comprueba la fecha.

3 Reconocimiento de la fecha de caducidad

Pulsa el botón **Comprobar artículo** para comprobar la fecha. El sistema intentará ahora reconocer la fecha en la imagen.

2022 08 Fecha fue reconocida

La fecha se muestra en verde. Haz clic en **Aplicar** para establecer la fecha del envase. Ahora el programa puede reconocer automáticamente las fechas de este artículo.

2023 08 No se reconoció la fecha

La fecha se muestra en rojo. Selecciona **Establecer fecha para envase** o da salida al envase para introducirlo manualmente.

Cómo utilizar los botones de control

- Busca la imagen que contiene la fecha de caducidad.
- Gira la imagen para que la fecha sea legible.
- Cambia los ajustes de iluminación para mejorar el reconocimiento de la fecha.
- Utiliza la lupa para ver mejor.

Consejos

- Se aplicará automáticamente una **fecha estándar** después de 5 días si el artículo no se procesa a través del programa OCR.
- Utiliza el botón **Almacenar siempre con fecha estándar** para gestionar automáticamente los envases sin fecha de caducidad.
- Si no se reconoce inmediatamente una fecha, comprueba la fecha que has escrito y el marco e inténtalo de nuevo.
- Puedes hacer una pausa en cualquier momento y continuar más tarde.

Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con el servicio técnico de BD Rowa™.

Este documento no sustituye al manual de instrucciones.
El contenido de las instrucciones de funcionamiento también debe leerse detenidamente y respetarse!

bd.com/rowa

BD, el logotipo de BD, Rowa, EasyLoad y ProLog son marcas comerciales de Becton, Dickinson and Company o sus filiales. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. © 2024 BD. Todos los derechos reservados. (Feb-2024 NPM-3806)

