

# Requisitos de instalación

Antes de que podamos instalar su sistema, asegúrese de que se cumplen los siguientes requisitos para garantizar una instalación sin problemas de su nuevo sistema BD Rowa. También encontrará una explicación detallada de cada uno de los aspectos en su contrato, en el apartado "Requisitos de instalación y condiciones de funcionamiento".

La sala debe ser al menos 80 mm más alta y 50 mm más ancha que la máquina a instalar.



La base del sistema puede compensar desniveles en el suelo de 30 mm. Los desniveles más grandes deben ser nivelados in situ.



El espacio necesario en el lugar de instalación de su BD Rowa debe ser fácilmente accesible y libre de obstáculos para el equipo técnico. El lugar de instalación debe mantenerse completamente despejado al principio de la instalación.



La carga superficial puede ser de hasta 600 kg/m<sup>2</sup> dependiendo del sistema instalado. Consulte su contrato para conocer el peso específico.



La temperatura ambiente del sistema debe estar entre 10°C y 22°C. La temperatura en el interior del sistema puede ser hasta 3°C superior a la temperatura ambiente.



Las condiciones de la conexión eléctrica son específicas del producto y se determinan en la fase de planificación. El cliente es responsable de un suministro de energía suficiente.



Es necesario disponer de una tarifa plana de Internet (puerto 80 como mínimo). Debe haber una toma RJ45 en las inmediaciones de la parte frontal del sistema. La línea de datos debe ser CAT5 o superior.



Durante la instalación, una persona debe estar a disposición del empleado de BD Rowa para ayudar con cualquier pregunta o problema específico.



El cliente debe comprobar las medidas de protección contra incendios requeridas y ponerlas en marcha si es necesario.



El lugar de instalación de la máquina debe estar libre de polvo en el momento de la instalación. No se pueden realizar al mismo tiempo trabajos de hormigonado, tabiquería seca o solado.

Si tiene más preguntas, póngase en contacto con su servicio BD Rowa.

Este documento no sustituye al manual de instrucciones. Lea también atentamente el contenido del manual de instrucciones.