


# BD Rowa Quick Guide

## Sauvegarde des données de connexion

### Instructions pour sauvegarder des nouvelles données de connexion

- 1 Ouvrez le BD Rowa™ Pickup Cloud sur <https://pickup.bd.com> ou le BD Rowa™ Vmotion Cloud sur <https://rowavmotion.bd.com> et entrez vos identifiants de connexion.
- 2 Une fois la connexion établie, une pop-up s'ouvre pour vous proposer de sauvegarder vos données de connexion.
- 3 Cliquez sur **Enregistrer** pour sauvegarder les données d'identification (voir l'exemple ci-dessous).
- 4 Vos identifiants sont maintenant sauvegardés et prêts à être utilisés. Cliquez sur **Se connecter** pour compléter la connexion au BD Rowa™ Pickup / Vmotion Cloud. Il se peut que vous deviez cliquer une fois dans le champ de l'adresse électronique et sélectionner votre utilisateur.

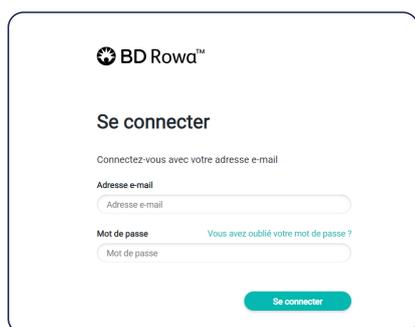

### Différents navigateurs

Pour obtenir plus d'informations sur le gestionnaire de mots de passe de chaque navigateur, scannez le code QR ou ouvrez le lien ci-dessous.

- Instructions pour modifier les données de connexion existantes.
- Instructions pour la suppression des données de connexion.
- Suppression de Pickup / Vmotion Cloud de la page **Ne jamais sauvegarder**.

#### Google Chrome



<https://support.google.com/chrome/answer/95606?hl=fr>

#### Microsoft Edge



<https://support.microsoft.com/fr-fr/topic/modifier-vos-mots-de-passe-dans-microsoft-edge-38ef988f-5a65-4c6a-9db8-937995d3ae31>

#### Safari



<https://support.apple.com/fr-fr/HT211145>

#### Mozilla Firefox



<https://support.mozilla.org/fr/kb/gerer-identifiants-gestionnaire-mots-de-passe-firefox>

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter le service BD Rowa.

Ce document ne remplace pas le mode d'emploi. Le contenu du mode d'emploi doit également être lu attentivement et respecté !

[bd.com/rowa](http://bd.com/rowa)

