

Guida rapida BD Rowa™

Servizio di backup personale



Interruzione di corrente a breve termine e come prepararsi ad affrontarla nella propria farmacia

Per un'interruzione di corrente di breve durata, si consiglia il servizio di backup personale BD Rowa™, che potete ordinare nel nostro negozio BD Rowa™: <https://shop.rowa.de/products/rowa-system-backup>
Ogni impianto ha bisogno di un proprio backup.

- 1 Collegamento del backup al computer di gestione
 - Aprire l'armadio di comando dell'unità Rowa.
 - Posizionare il backup in un luogo sicuro accanto al computer di gestione operativa 1 e collegare il connettore USB a una porta libera.
- 2 Contattare il servizio di assistenza BD Rowa™ che provvederà ad attivare il servizio di backup.



Emergenza: ecco come si lavora durante un blackout

- 3 Lavorare con il backup
 - Rimuovere il backup dalla macchina BD Rowa™ in caso di blackout.
 - Collegare il backup a un computer portatile Windows (Smart, Vmax160, Vmax210) o Mac (solo Smart e Vmax160).
 - Il software si installa automaticamente e si apre in inglese.
Su un BD Rowa™ Vmax 210, il backup è legato all'impostazione della lingua del sistema.
 - Elaborare le scorte sul portatile equivale a rimuovere i prodotti in modalità di emergenza sul Rowa.

A Pulsante Disco

Aprire un database di backup sul dispositivo di archiviazione USB.
x Campo di ricerca vuoto / è possibile avviare una nuova ricerca

B Campo di ricerca


Immissione di parti del codice a barre o del nome dell'articolo

C Elenco degli articoli

Elenco della selezione di articoli, inserendo il campo di ricerca

D Posizione di stoccaggio

Dettagli sulla posizione esatta

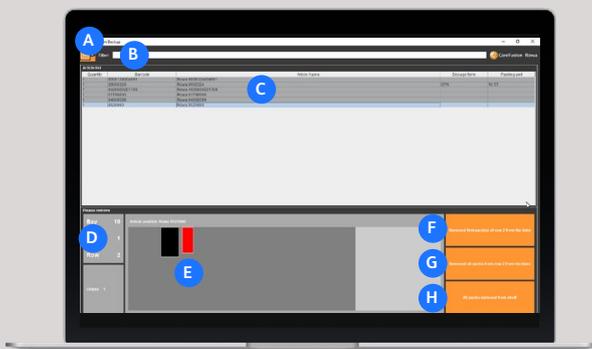

E Display grafico

la posizione esatta dell'imballaggio da rimuovere viene visualizzata graficamente

F Confezione rimossa

Qui si conferma la rimozione del pacchetto visualizzato

G Fila prodotto rimossa

Qui si conferma la rimozione dei prodotti di una fila.

H Rimuovere tutte le confezioni dallo scaffale

Qui si conferma che tutte le confezioni di uno scaffale sono state rimosse

Guida rapida BD Rowa™

Servizio di backup personale

Fine del blackout elettrico: come riprendere il lavoro

4 Continuare il lavoro

- Una volta terminata la rimozione degli oggetti tramite il portatile e ripristinata l'alimentazione, i dati vengono sincronizzati sul computer della struttura.
- Per questa procedura, contattare nuovamente il servizio di assistenza BD Rowa™.

5 Dopo aver ripreso il funzionamento del sistema, è utile eseguire una scansione del sistema.

Se non avete ancora familiarità con la funzione, vi consigliamo di seguire il corso di formazione avanzata per utenti BD Rowa™ Vmax presso il centro di formazione clienti.

Interruzione di corrente a lungo termine

Per un'interruzione di corrente a lungo termine, è necessario un generatore.

Contattare un elettricista locale, poiché è necessario determinare esattamente il generatore necessario per la farmacia. Assicuratevi di avere carburante a sufficienza ed eseguite un giro di prova.

In caso di ulteriori domande, si prega di contattare il Servizio di assistenza BD Rowa™.

Questo documento non sostituisce le istruzioni per l'uso.
Anche il contenuto delle istruzioni per l'uso deve essere letto attentamente e rispettato!

bd.com/rowa

BD, il logo BD e BD Rowa sono marchi di fabbrica di Becton, Dickinson and Company o delle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari. © 2022 BD. Tutti i diritti riservati. Dicembre-2022

