


BD Rowa™ Vmax

Unité réfrigérante

Pièces de machine

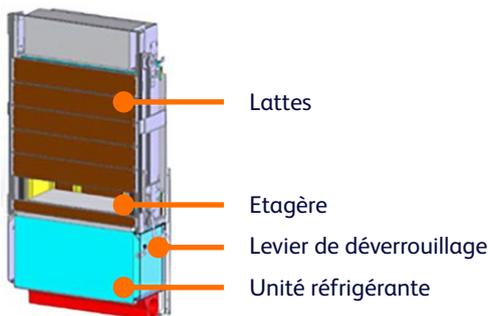

Vous voulez en savoir plus ?

Visitez le BD Rowa™ Customer Learning Center à <https://clc.rowa.de>.

Utilisation générale

- Chargement et sortie comme d'habitude.
 - Les articles doivent être configurés comme réfrigérés dans le système informatique de la pharmacie.
 - Les articles réfrigérés sont surlignés en turquoise dans la **Présentation des produits**.
- Le **bouton de réinitialisation** permet de confirmer une alarme sonore et de réinitialiser les températures minimale et maximale.

Sortie manuelle des boîtes

- Les poignées de commande manuelle sont placées dans un support au-dessus du tapis de chargement.
- Utilisez l'une des poignées pour déplacer le levier de déverrouillage vers le haut et légèrement vers la gauche jusqu'à ce que la résistance soit vaincue. Les lattes sont maintenant déverrouillées.
- Utilisez deux poignées pour ouvrir les lattes :
 - Placez les poignées dans les trous d'épingle à gauche et à droite.
 - Poussez les lattes vers le haut, en exerçant une légère pression sur les poignées. Déplacez max. 3-4 lattes à la fois - utilisez plus de poignées si nécessaire !
 - Lorsque la position souhaitée est atteinte, poussez les poignées dans les trous prévus à cet effet.
- Retirez les boîtes nécessaires avec l'aide d'enlèvement.
- Tirez doucement sur les poignées pour que les lattes ne soient plus fixées. Abaissez lentement les lattes jusqu'à la position de départ.
- Remplacez les poignées dans leur support, au-dessus du tapis de chargement. Si les poignées ne sont pas dans le support, la machine ne pourra pas démarrer !
- Confirmez la sortie manuelle à l'écran.



Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter le service BD Rowa™.

Ce document ne remplace pas le mode d'emploi. Le contenu du mode d'emploi doit également être lu attentivement et respecté !

bd.com/rowa

BD, le logo BD, Rowa, et Vmax sont des marques commerciales de Becton, Dickinson, and Company ou de ses filiales. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. © 2024 BD. Tous droits réservés. (Jan-2024 NPM-3788)

