

BD Rowa™ Vmotion

Guía de diseño de planogramas


¿Qué efecto puede conseguir un planograma bien diseñado?

- Gran selección de contenidos de alta calidad para atraer a los clientes a nivel emocional.
- Soporte visualmente atractivo para asesoramiento y ventas adicionales.
- Destaca ofertas, publicidad de productos y servicios propios.



¿Quieres saber más?

Visita el BD Rowa™ Customer Learning Center en <https://clc.rowa.de>.

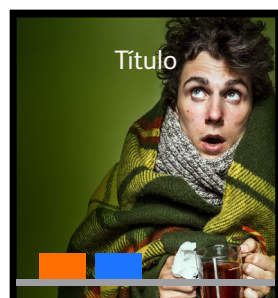

Título y fondo

¡Utiliza los contrastes!


Si quieres que tu oferta se vea, anúnciala claramente y con un alto contraste. Haz coincidir el color del título con la imagen de fondo y asegúrate de que haya suficiente contraste entre el texto, los envases y el fondo.



Estantes

¡Utiliza el espacio!

Elige la cantidad adecuada de estantes para crear una buena relación entre el tamaño del envase y la altura de los estantes. Recomendamos utilizar entre cuatro y cinco estantes.

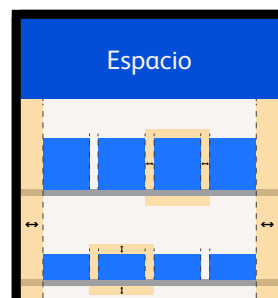

Espacio

¡Crea espacio!


Asegúrate de que quede espacio entre los envases, los laterales y el borde superior de la estantería. Para conseguir un efecto ordenado, puedes alinear uniformemente los lados izquierdo y derecho.



Cantidad y tamaño de los productos

¡Concéntrate en la visibilidad!

Asegúrate de que todos los nombres de los productos sean fácilmente reconocibles. Tus clientes deben poder leer el nombre más pequeño incluso a cierta distancia de la pantalla. Para llenar el espacio de la estantería de forma óptima, debes mostrar un máximo de cuatro productos por estante.

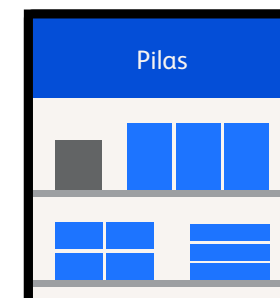

Pilas

¡Optimiza!

Llena las filas de forma armoniosa. Para pilas del mismo producto, recomendamos combinar un máximo de cuatro envases en horizontal y tres en vertical.

Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con el servicio técnico de BD Rowa™.

Este documento no sustituye al manual de instrucciones.
El contenido de las instrucciones de funcionamiento también debe leerse detenidamente y respetarse!

bd.com/rowa

BD, el logotipo de BD, Rowa y Rowa Vmotion son marcas comerciales de Becton, Dickinson and Company o sus filiales. © 2023 BD. Todos los derechos reservados. (Nov-2023 NPM-3192)

 **BD Rowa™**