

# BD Rowa™ Vmotion

## Utilizzo dello schermo Vmotion

### Hardware

#### Accendere lo schermo

Premere il **tasto di standby** del **telecomando** in dotazione.

#### NUC



Se l'installazione utilizza i NUC, questi devono rimanere sempre accesi. È buona norma **riavviarli periodicamente**. Scansionare il codice QR<sup>1</sup> per vedere un video su come riavviare il NUC.

### Software

#### Navigazione nei planogrammi

Tutti i planogrammi attivi possono essere aperti attraverso il menu a tendina.

- 1 **Trascinare il dito verso il basso** al centro dello schermo per aprire il menu.
- 2 Passare dalla **playlist attiva** al **menu a tendina** utilizzando i pulsanti corrispondenti.
- 3 Utilizzare **l'alfabeto** per cercare i planogrammi per titolo.
- 4 Fare clic sulla **freccia** per spostare i planogrammi in fondo.
- 5 **Toccare** un planogramma per aprirlo.



È anche possibile scorrere tra i planogrammi passando il dito a **sinistra** o a **destra**. La sequenza può essere definita nel BD Rowa™ Vmotion Cloud.

**Suggerimento:** Utilizzare **un solo dito** per azionare lo schermo.

#### Riavvio del software

**Trascinare il dito verso l'alto** al centro dello schermo e toccare **l'icona di spegnimento** per chiudere l'applicazione. Sul desktop si trova l'icona BD Rowa™ Vmotion per avviare nuovamente il software.

In caso di domande, non esitate a contattare il servizio di assistenza BD Rowa™.

Questo documento non sostituisce le istruzioni operative. Anche il contenuto delle istruzioni operative deve essere letto attentamente e seguito!

[bd.com/rowa](https://bd.com/rowa)

BD, il logo BD, Rowa e Vmotion sono marchi di fabbrica di Becton, Dickinson and Company o delle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari. © 2024 BD. Tutti i diritti riservati. (Jan-2024 NPM-3814)



Vuoi saperne di più?

Visita il BD Rowa™ Customer Learning Center all'indirizzo <https://clc.rowa.de>.


#### Pulizia dello schermo



Utilizzare un **panno asciutto** in combinazione con uno **spray disinfettante** per pulire il touchscreen senza lasciare striature. Visitate il BD Rowa™ Webshop<sup>2</sup> per vedere la nostra gamma di prodotti per la pulizia.

#### Scheda prodotto

Toccando un prodotto si apre la scheda del prodotto:

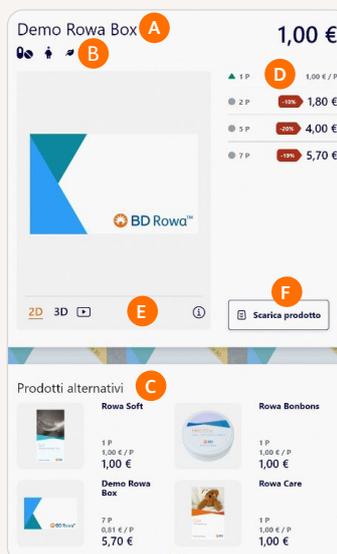

**A Nome del prodotto**

**B Nota disponibile**

Se vedete questa icona, assicuratevi di leggere le note.

**c Alternative e suggerimenti**

**D Dimensioni, prezzi e scorte delle confezioni**

- ▲ : stock > 20
- ▼ : stock < 20
- : nessun stock

**E Informazioni, opzioni di immagine e video**

**F Prodotto in uscita**

**Suggerimento:** Mettete sullo scaffale le confezioni più piccole per confrontare facilmente e risparmi.

#### Links

- 1 <https://rowa.de/it/page/training-videos-videopage-it/#vmotion>
- 2 <https://shop.rowa.de/it/collections/beraten-verkaufen>

