

BD Rowa™ Vmax/Smart

Suggerimenti per la conservazione

Carico delle confezioni

- 1 Posizionare la confezione appena scansionata contro barriera del nastro di carico.
- 2 Posizionare le confezioni con la faccia più ampia sul nastro di stoccaggio e il lato più lungo verso la barriera.
- 3 Far scorrere la confezione lungo la barriera, dal centro verso il puntatore laser rosso (fig. 1).

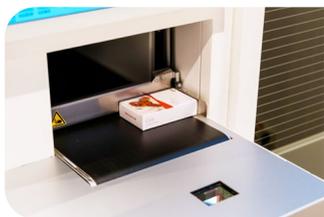


fig. 1



fig. 2

Confezioni dietro la barriera

Per la vostra sicurezza, le confezioni che si trovano oltre la barriera non devono più essere toccate. Le confezioni situate oltre la barriera sono registrate nell'inventario dei robot.



Dimensioni minime e massime

Durante il processo di inserimento, rispettare le seguenti dimensioni minime e massime delle confezioni:

- Dimensioni minime (LxHxP): 15x15x35 mm
- Dimensioni massime (LxHxP): 140x145x230 mm
- Peso massimo: 1000 g
- Peso massimo con BD Rowa™ EasyLoad/ProLog: 800g

Confezioni rotonde

È possibile conservare anche confezioni rotonde (fig. 2). Si prega di notare che ciò può influire sulla capacità del sistema BD Rowa™.

- Dimensioni minime: Ø = 45 mm, H = 15 mm
- Dimensioni massime: Ø = 140 mm, H = 100 mm
- Peso massimo: 800 g



Vuoi saperne di più?

Visita il BD Rowa™ Customer Learning Center all'indirizzo <https://clc.rowa.de>.

Inoltre, le confezioni rotonde devono soddisfare i seguenti requisiti:

- Non devono esserci sporgenze o irregolarità nella forma.
- Le confezioni rotonde devono poter essere misurate elettronicamente.
- Assicurarsi che tutte le confezioni siano compatibili con le soluzioni BD Rowa™ installate (ad esempio, nastri trasportatori o scivoli a spirale).
- Il diametro del tappo non deve essere significativamente più piccolo del resto del flacone.

Confezioni incompatibili

Non conservare le seguenti confezioni perché potrebbero causare errori:

- Confezioni con linguette sporgenti.
- Confezioni doppie.
- Confezioni avvolte in carta stagnola.

Carico iniziale

Per il caricamento iniziale, si consiglia di stoccare solo confezioni in piccole quantità e di inserire le scorte in eccesso in un secondo momento.

Tutte le confezioni inserite saranno contrassegnate come scorte di robot nel sistema informatico della farmacia.

Per utilizzare in modo efficiente la capacità della vostra macchina e per effettuare i prelievi il più rapidamente possibile, vi consigliamo i nostri imballaggi esterni e i supporti di carico per articoli dalla forma irregolare, che potete ordinare nel Webshop BD Rowa™ (<https://shop.rowa.de>).



In caso di domande, non esitate a contattare il servizio di assistenza BD Rowa™.

Questo documento non sostituisce le istruzioni operative. Anche il contenuto delle istruzioni operative deve essere letto attentamente e seguito!

bd.com/rowa

BD, il logo BD, Rowa, EasyLoad, ProLog, Smart e Vmax sono marchi di fabbrica di Becton, Dickinson and Company o delle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari. © 2024 BD. Tutti i diritti riservati. (Jan-2024 NPM-3794)

 **BD Rowa™**